


COOLITE PRO • MED

Laser a diodi 810nm



L'evoluzione dei laser per epilazione

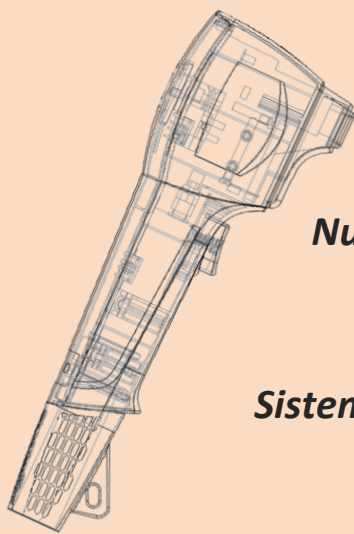

Nuova tecnologia di trasmissione a fibra ottica

***Sistema "Super Hair Removal": massima efficacia e
nessun tempo di recupero***



A ALEA

Strada Genova, 299
10024 Moncalieri (TO)
Tel. + 39 011.68.11.907
Fax + 39 011.64.70.395
info@aleasas.it

COOLITE PRO • MED

Laser a Diodi 810 nm



LA NUOVA TECNOLOGIA A FIBRA OTTICA


Coolite Pro introduce la tecnologia di trasmissione del segnale luminoso attraverso fibra ottica nel mondo dei laser per epilazione.

La recente tecnologia del Coolite Pro garantisce un migliore sistema di raffreddamento e consente di raggiungere una temperatura di lavoro di 45°C; la durata della vita del dispositivo risulta così significativamente prolungata.

Inoltre il sistema a fibra ottica emette un fascio di energia uniforme e con una minore angolazione rispetto alle tecnologie precedenti, di conseguenza la luce raggiungerà al suo picco energetico proprio la zona bersaglio dei bulbi piliferi.

Come funziona Coolite Pro con sistema SHR?


SHR sta per "Super Hair Removal" ed è un'innovativa tecnologia che permette la massima efficacia nel campo dei laser per l'epilazione.

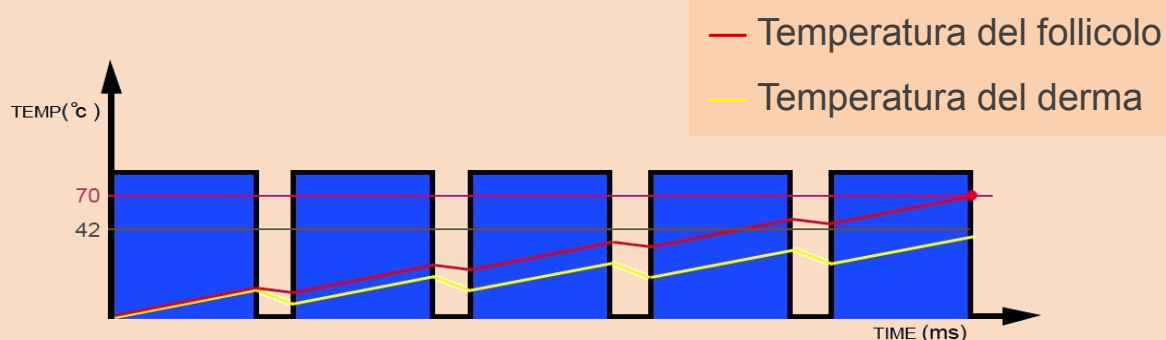

La temperatura del follicolo pilifero aumenta con una maggiore intensità rispetto alla temperatura del derma, nello stesso lasso di tempo. Questo permette di far raggiungere al bulbo una temperatura tale da far cadere il pelo, senza creare danni alla pelle.

L'innovativo manipolo leggero e maneggevole

La tecnologia di trasmissione del segnale in fibra ottica permette di spostare il componente a diodi, prima posizionato all'interno del manipolo, direttamente nell'unità centrale del dispositivo. In questo modo il manipolo risulta concretamente più leggero.

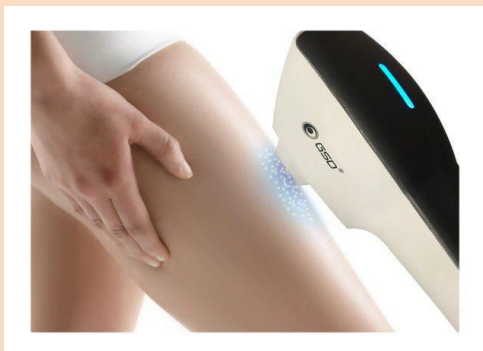

Inoltre la massima energia viene emessa con un minor aumento di temperatura, questo consente il massimo raffreddamento della punta del manipolo, per un trattamento gradevole e ben tollerato.

Dispositivo portatile

Grazie al suo design, ha solo 0.065 m³ di volume e 22 kg di peso, il Coolite può essere trasportato in modo semplice e pratico.

Il dispositivo ha gli stessi componenti ad alta potenza dei dispositivi fissi con vantaggi ancora più evidenti.

Il prezzo di acquisto competitivo e la mancanza di consumabili garantiscono rendimenti effettivi sull'investimento.

Punta del manipolo in zaffiro raffreddata

Il sistema di raffreddamento con punta in zaffiro assicura un risultato affidabile e costante per tutta la superficie della pelle a contatto con il laser.

Massimo comfort e sicurezza. La temperatura di raffreddamento va da 0 a 5 °C, aumentando ulteriormente il comfort del trattamento.



Vantaggi di Coolite Pro •MED


- Garantiti 25 milioni di shots, durata media del manipolo fino a 60 milioni di shots.
- Non necessita di manutenzione ordinaria
- Trattamenti indolori
- Adatto a tutti i fototipi



SPECIFICHE TECNICHE

Coolite Pro

Tipo di Laser	A diodi, trasmissione in fibra ottica
Lunghezza d'onda	810nm
Potenza di uscita	640 W
Durata impulso	7-600ms
Energia impulso	1-100J/cm ²
Frequenza	1-10Hz
Fototipo	I-VI
Modalità d'uso	Fast mode, Free setting
Dimensione "Spot"	12mm*12mm
Sistema di raffreddamento	Punta del manipolo in Zaffiro
Temperatura di raffreddamento	≤5°C
Peso netto	22KG

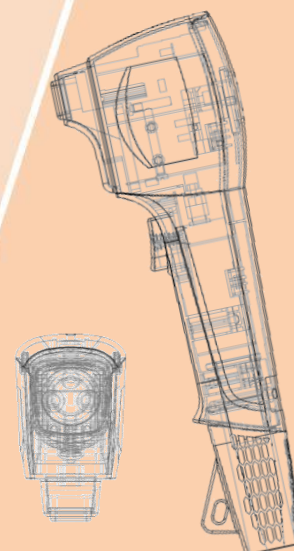

L'operatore deve leggere attentamente il "Manuale d'uso" ed attenersi scrupolosamente alle sue istruzioni.